



**РАСШИРЯЙТЕ АУДИТОРИЮ
И ПОЛУЧАЙТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
ВМЕСТЕ С АППАРАТОМ
LPG® CELLU M6 ALLIANCE®**

**Целевая аудитория:
пациенты после пластических
операций**



Что мы предлагаем?

**ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
АУДИТОРИИ**

на растущем рынке

**«ПАЦИЕНТЫ
ПОСЛЕ
ПЛАСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ»**

- Данный сегмент незаслуженно забыт
- Практически никто не ведет активное продвижение услуг на эту аудиторию

! ВЫ НЕ ДОПОЛУЧАЕТЕ ПРИБЫЛЬ !

Пластическая хирургия: что происходит сейчас?

2020 год

Из-за пандемии **сформировался отложенный спрос**

Изменился портрет пациента: если раньше считалось, что делать операцию лучше за границей, то сейчас российские клиники доказали, что и им можно доверять

2021 год

«Работа на удаленке» сделала возможным пластические операции для тех, кто раньше не мог позволить себе реабилитацию

Увеличилось число мужской аудитории

Эксперты рынка ожидают **увеличение оборотов клиник** пластической хирургии на **20-25%**

Продвижение пластической хирургии приобрело **активный, агрессивный характер** во всех СМИ, особенно в соцсетях

!
Теперь пациент хочет получить **максимальный результат** в **минимальные сроки**

**ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
ПРИБРЕТАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ**

LPG
endermologie

2021 – 2022. Ваши дополнительные точки роста

- **Рост числа пациентов,**
которым необходима реабилитация после пластических операций = **увеличение дохода за счет нового сегмента «пациенты после пластических операций»**
- **Увеличение доходности ПИК за счет:**
 - Расширения аудитории (новые клиенты после пластических операций)
 - Увеличения числа постоянных клиентов (новые клиенты могут стать постоянными)
 - Расширения среднего чека (новые клиенты, в будущем, могут воспользоваться другими услугами ПИК)
 - Увеличения продажи курсовых процедур:
КЛИЕНТЫ ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ — ЭТО ВСЕГДА КУРС ПРОЦЕДУР = ВАШ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД



Выиграют те ПИК, которые будут говорить, анонсировать, продвигать услуги по реабилитации после пластики

После каких операций применяется LPG®?

ЛИЦО

- Блефаропластика
- Эндоскопический лифтинг
- Фейслифтинг
- Ограниченная или обширная липосакция на лице
- Пластика подбородка
- Височная подтяжка
- Удаление комков Биша
- Хейлопластика

ТЕЛО

- Липосакция
- Пластика ягодиц
- Абдоминопластика
- Липофилинг
- Маммопластика



Что может LPG® в реабилитации?

- **Снизить болевой синдром**
 - **Уменьшить воспаление** и устранить острые посттравматические состояния (отек, гематома, боль)
 - Быстро купировать травматический отек, улучшить микроциркуляцию, повысить интенсивность обменных процессов и, следовательно, **сократить срок послеоперационного периода**
 - **Снизить риск развития осложнений**, связанных с нарушением трофики оперированных тканей
 - Создать оптимальные условия для быстрого и благоприятного послеоперационного заживления тканей
- В РЕЗУЛЬТАТЕ** →
- **Создаются оптимальные условия для быстрого и благоприятного послеоперационного заживления тканей**
 - **Уменьшаются дискомфортные ощущения**
 - **Происходит быстрое рассасывание** послеоперационных **гематом**
 - **Восстанавливается психоэмоциональное состояние пациента**



ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ВЫБОРА ДЛЯ РАННЕГО И ПОЗДНЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Что может LPG® в реабилитации?

Результаты исследования, клиника пластической хирургии «ГрандМед», Санкт-Петербург

Симптомы послеоперационного периода	1 группа Реабилитация с LPG® терапией	2 группа Реабилитация БЕЗ LPG® терапии
Отек	10 – 14 дней	20 – 30 дней
Гематомы	10 – 12 дней	15 – 28 дней
Парестезия	20 – 26 дней	40 – 60 дней
Общая слабость	3 дня	7 дней
Гипертермия	2 дня	6 дней

Длительность реабилитации после пластических операций с LPG® терапией сокращается в среднем в 2 раза



ВХОДИТ В ПРОГРАММУ ВЫБОРА ДЛЯ РАННЕГО И ПОЗДНЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА

Курс реабилитации после пластических операций. ЛИЦО

**Микротоковая терапия + LPG®: схема восстановления,
которую нельзя игнорировать**



Почему микротоковой терапии недостаточно?

Почему с LPG® реабилитация эффективнее,
а результат быстрее?

- Это две разные технологии, дополняющие друг друга
- Микротоковая терапия заточена на то, чтобы убрать отек первых дней, который больше всего беспокоит пациентов, и подготовить ткани к дальнейшей реабилитации. Микротоковая терапия фактически подготавливает пациента к последующему периоду реабилитации
- LPG® выступает фундаментом, в дополнение к микротоковой терапии, делает основную дальнейшую работу. Обеспечивает максимальный лимфодренажный эффект, уменьшает фиброзные изменения, улучшает кровообращение, позволяя тканям восстанавливаться в кратчайшие сроки



Ранний послеоперационный период. Что можно предложить пациенту?



Микротоковый лимфодренаж

Когда: на 2-3 сутки по назначению врача
Количество процедур: от 5 до 10-12
Кратность: ежедневно или через день
Протокол: лимфодренажный массаж



LPG® терапия

Когда: как правило, на 5-7 сутки после операции
Количество процедур: 4-10 сеансов процедур на аппарате LPG® Cellu M6 Alliance®
Кратность: через 1-2 дня
Протокол в соответствии с показаниями из раздела «Эстетическая медицина»

Экономика*

- Микротоковая терапия, 10 процедур = 12 000 руб.
- LPG® терапия (дренаж), 10 процедур = 20 000 руб.

Стоимость курса: 32 000 руб.

Длительность курса: от 1 месяца

**указан средний диапазон цен для регионов СПб и Мск*

**предложен средний курс, в зависимости от типа вмешательства количество процедур может быть изменено*



Допродажа эстетических протоколов как для оптимизации финального результата, так и в качестве самостоятельной услуги по коррекции тела или омоложению лица



Поздний период реабилитации. Что можно предложить пациенту?

В позднем периоде реабилитации на лице с целью улучшения трофики травмированных тканей, стимуляции неоколлагеногенеза и оптимизации финального результата пластической операции, **могут быть предложены и эстетические процедуры на аппарате LPG® Cellu M6 Alliance®**

Экономика

- LPG® массаж, 10 процедур

Стоимость курса: от 35 000 руб.

Длительность курса: от 1 месяца



Поддерживающие процедуры после вмешательства

- Оптимизация для лица
- Оптимизация для рук
- Оптимизация для области шеи
- Оптимизация для зоны декольте

Когда: регулярно (курс процедур 1-2 раза в год)

Кратность: 2-3 раза в неделю

Цель: поддержание полученного эффекта от пластических операций

Применяемые протоколы: полный спектр целевых процедур в соответствии с пожеланиями пациента и рекомендациями врача

Клинические результаты*

Лечение посттравматических явлений



Реабилитация после фейслифтинга



*Материалы предоставлены Клиникой пластической хирургии «ГрандМед»

Курс реабилитации
после пластических операций.
ТЕЛО

Схема восстановления, которую нельзя игнорировать

Ранний послеоперационный период. Что можно предложить пациенту?

LPG® терапия

Когда: как правило, на 4-5 сутки после операции

Количество процедур: 8-10 сеансов процедур на аппарате
LPG® Cellu M6 Alliance®

Кратность: через 1-2 дня

Протоколы в соответствии с показаниями из разделов
«Эстетическая медицина» и «Терапия»



Экономика*

▪ LPG® массаж, 10 процедур

Стоимость курса: 25 000 руб.

Длительность курса: 1 месяц

**указан средний диапазон цен для регионов СПб и Мск*

**предложен средний курс, в зависимости от типа вмешательства
количество процедур может быть изменено*



**Допродажа эстетических
протоколов** как для оптимизации
финального результата, так
и в качестве самостоятельной
услуги по коррекции тела или
омоложению лица



Дополнительный доход на постоянной основе



ПОМНИТЕ!

Реабилитация у всех протекает индивидуально.
Кто-то восстанавливается за 1-2 месяца, а кто-то — от 6 до 12 месяцев

И ЭТО ВСЁ – ВАШ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДОХОД
на постоянной
основе

Анонсируйте
восстановление после
пластической
хирургии!

ГДЕ?

- В социальных сетях
- На окнах
- В зоне ожидания
- На корпоративном сайте

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ БОЛЬШЕ!

Аппарат LPG® Cellu M6 Alliance®



- **Многоцелевой аппарат последнего поколения** от компании LPG Systems (10-поколение аппаратов LPG®)
- **Сочетает 2 технологии в 1 аппарате** для работы по **лицу** и по **телу**
- **Успешно применяется в эстетике, реабилитации, спорте, SPA-направлении**
- **Позволяет работать круглый год**
- **Эффективен, как в моноварианте, так и в сочетании с любыми методами эстетической коррекции**

Дополнительные материалы по теме


Статья А.С. Марченко,
сайт ГК «СпортМедИмпорт»



https://www.sportmedimport.com/info/articles/stati_oborudovanie/sovremenny-y-podkhod-k-vostanovitelnomu-lecheniyu-patsientov-posle-plasticheskoy-operatsii-na-litse/

**Авторский вебинар
А.С. Марченко**

«Схема реабилитации после пластики лица, которую не стоит игнорировать»

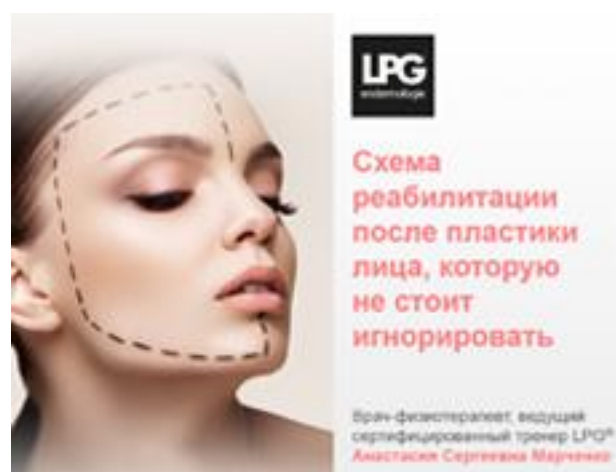

<https://events.webinar.ru/1142361/8475175/record-new/8649327>

**Авторский вебинар
А.С. Марченко**

«Реабилитация после пластики тела с LPG®»



<https://events.webinar.ru/1142361/8810043/record-new/9014095/bfa9c2b369fd13521a14a7fb97ab4683>

ГК «СпортМедИмпорт»

Санкт-Петербург,
В.О., 4-ая линия, д. 13

Москва,
ул. Нежинская, д.8, корп. 1

 **8 (800) 222-97-79**



sportmedimport.com



facebook.com/SportMedImport



vk.com/sportmedimport



[sportmedimport](https://instagram.com/sportmedimport)

